


MANUAL DE USUARIO

städ

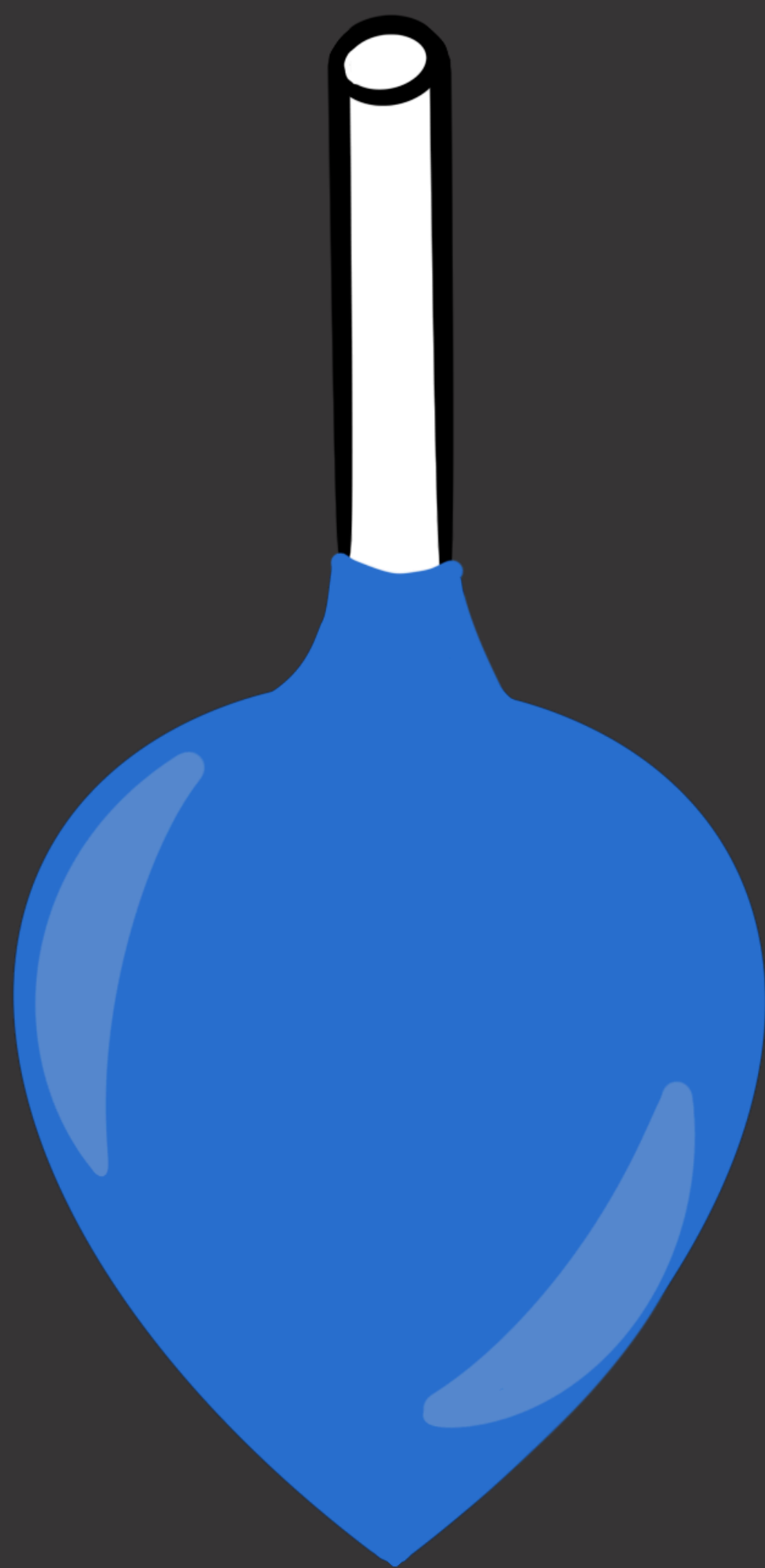

nöje


¡Felicidades por elegir städ!

Rompe el tabú y adéntrate en un nuevo mundo de confianza y bienestar con **städ**, la ducha anal (enema) que te brinda una higiene completa.

En este manual, encontrarás toda la información que necesitas para aprovechar al máximo las características de **städ**.

Explora con confianza y descubre cómo **städ** puede aportar seguridad y frescura a tus momentos más íntimos. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y este manual está diseñado para garantizar que cada sesión con **städ** sea tan placentera como única.

Gracias por confiar en **städ** para ser tu compañero en el cuidado y disfrute personal.

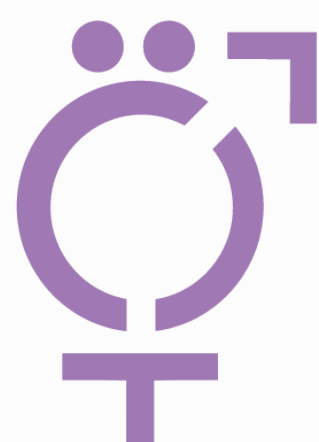


DETALLES

städ es una ducha anal (enema) que gracias a su diseño ergonómico te permite una limpieza completa y cómoda de la zona anal y rectal, ayudándote a preparar esos momentos íntimos con total seguridad y confianza.

städ es completamente seguro y amigable con cualquier tipo de cuerpo, brindando un cuidado suave y efectivo.


La facilidad de uso de **städ** te garantiza una higiene óptima, permitiendo que disfrutes de una experiencia mucho más placentera durante el sexo anal sin preocupaciones

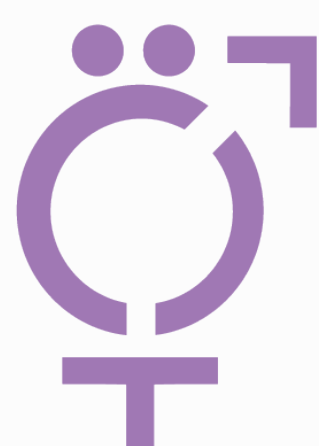


CARACTERÍSTICAS

städ tiene una capacidad de 160ml, fabricado de silicona de alta calidad + plástico ABS

Para una mejor experiencia se recomienda el uso de lubricante a base de agua

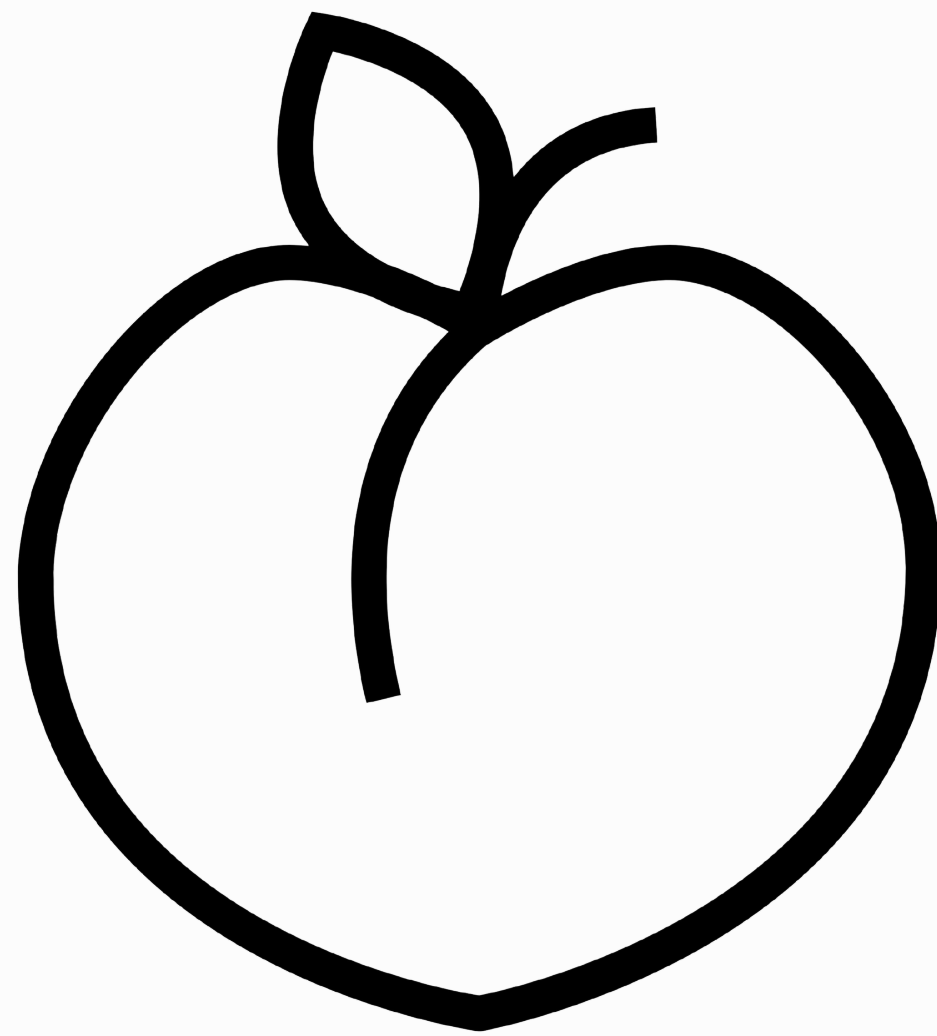


ANAL

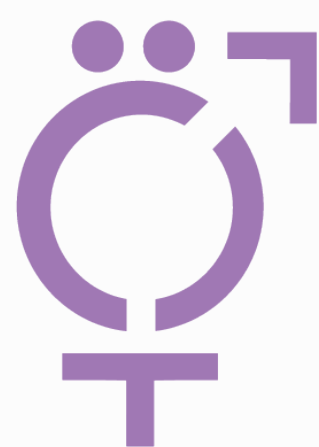


ESTRUCTURA

TAMAÑO	15.5*7 cm
PESO	70 g
COLOR	Azul
CAPACIDAD	160 ml
MATERIAL	Silicon+Abs


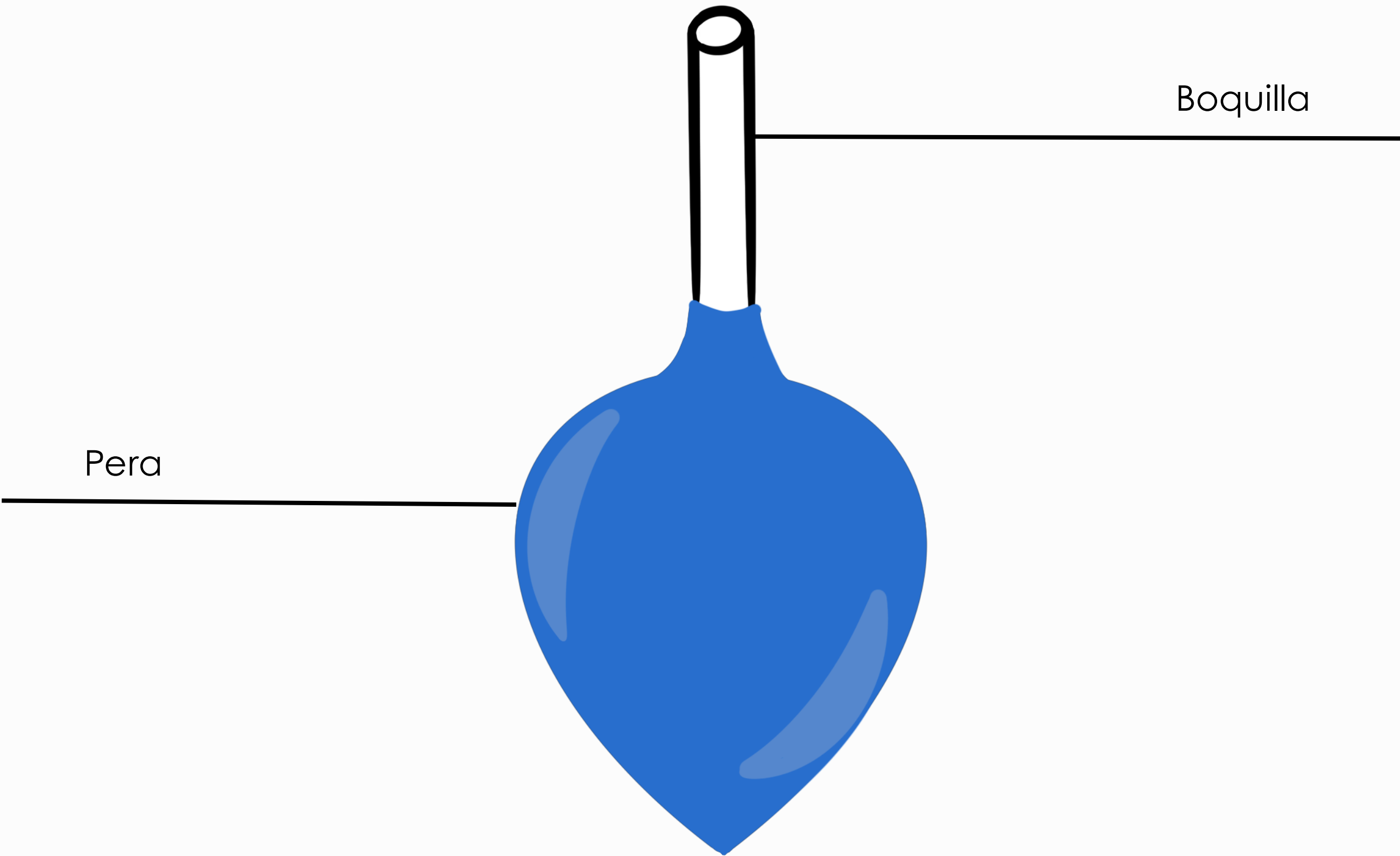


USO

1. Separa la boquilla de la pera de **städ** y llénalo con agua tibia.
2. Posteriormente, exprime la pera para vaciar del agua, y asegúrate de que **städ** este limpio para poder llenarlo nuevamente con agua tibia.
3. Aplica lubricante a base de agua en la punta de la boquilla de **städ** y alrededor de la zona anal para facilitar la inserción.
4. Con la boquilla de **städ** bien lubricada, introdúcela suavemente en el ano y presiona la pera lentamente para que el agua fluya hacia el interior del recto. Puedes realizar este paso sentado en el inodoro o en la regadera.
5. Una vez hayas introducido toda el agua, retira la boquilla sin dejar de apretar la pera de **städ**.
6. Intenta mantener el agua dentro del recto unos segundos, apretando el esfínter, hasta que sientas la necesidad de expulsarla.
7. Repite el proceso las veces que sea necesario hasta que el agua salga completamente limpia.

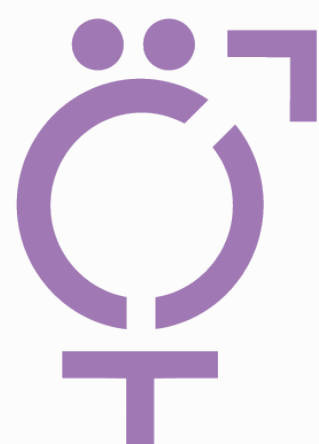

MODO DE USO

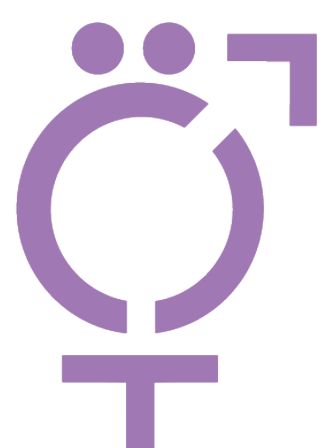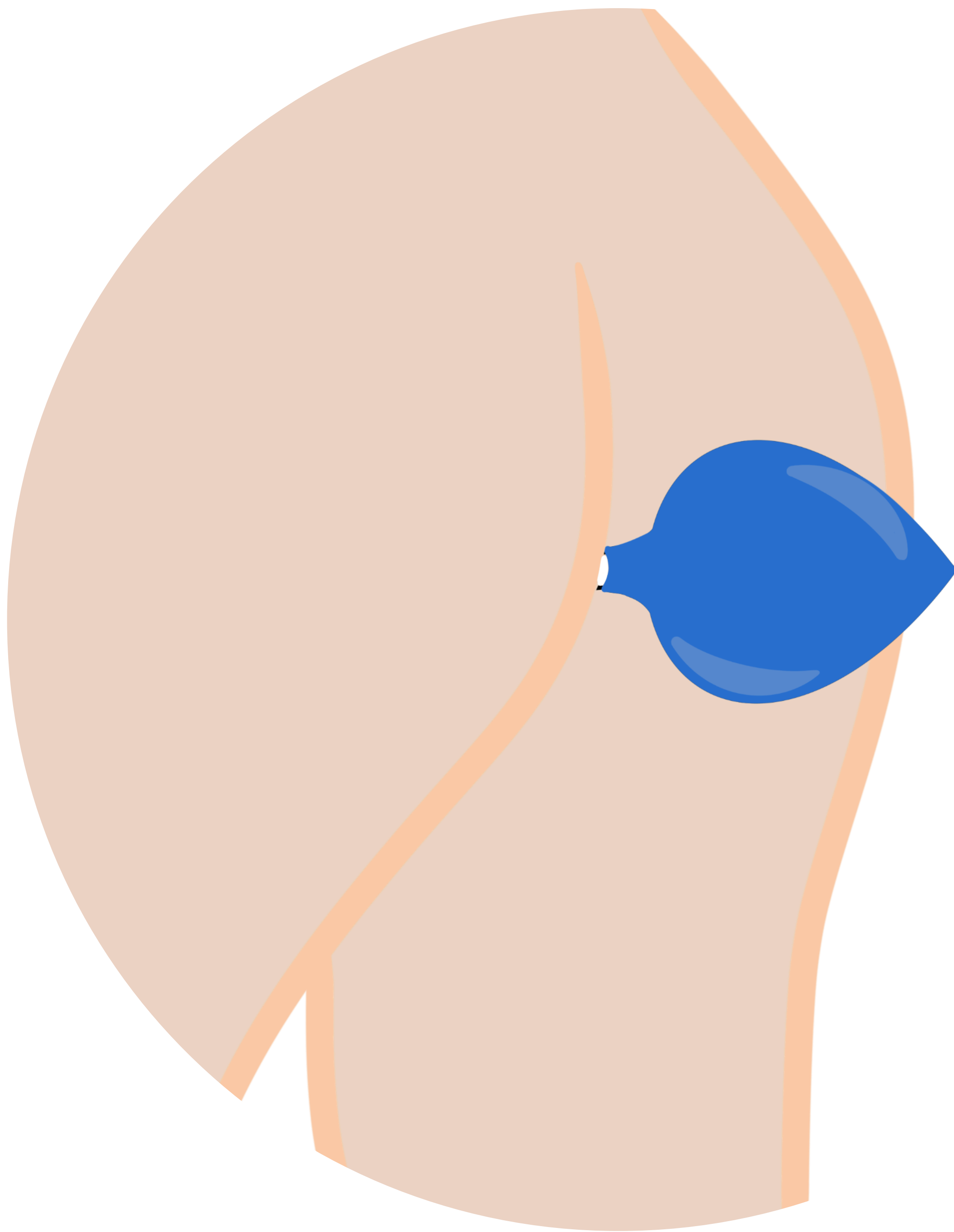

CUIDADOS Y LIMPIEZA


Se recomienda lavar antes y después de cada uso, con agua templada y jabón bactericida, el secado debe de ser mediante una toalla o paño con pequeños toques para reducir la fricción y así evitar dejar pelusas o residuos.

No exponerlo a luz solar directa y altas temperaturas.

Mantener en un lugar fresco y seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

städ es como las contraseñas, no se comparten, esto para evitar posibles riesgos de salud.

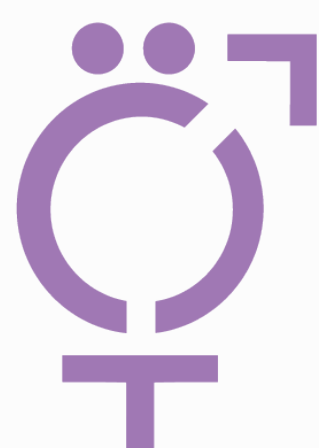



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

nöje no se hace responsable de un uso indebido del producto. Esta ducha anal está diseñada para ser utilizada exclusivamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso será bajo la responsabilidad del usuario.

Antes de utilizar **städ**, consulte con un profesional de la salud para asegurarse de que su estado de salud sea compatible con el uso de este producto. **nöje** no asume ninguna responsabilidad por lesiones o complicaciones derivadas de condiciones preexistentes no consideradas.

En caso de experimentar molestias, irritación o cualquier otra reacción adversa durante o después del uso, suspenda el uso y consulte a un profesional de la salud.

nöje no se hace responsable de lesiones, daños o consecuencias derivadas del uso inadecuado del producto.

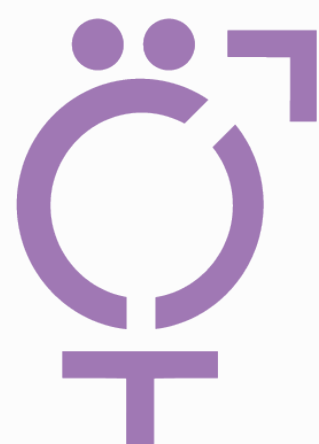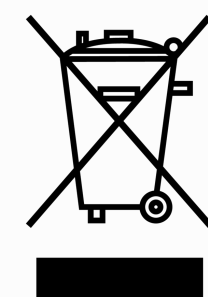



nöje

www.noje.com.mx

FB: Nöje

IG: @noje.mx

Tiktok: @noje.mx

soporte:

 33 2639 2320

hola@noje.com.mx

nöje